





Руководство пользователя

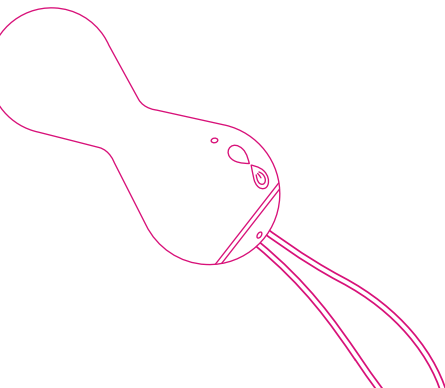

Схема

1	Кнопка включения/ Переключения режимов
2	Световой индикатор
3	Кнопка перезагрузки
4	Гнездо для зарядного устройства
5	Шнур/Антенна
6	Вибрирующая зона

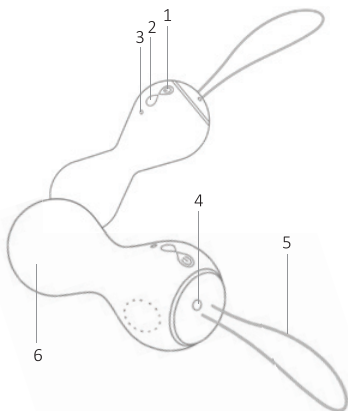

Технические характеристики

Материал	Безопасный силикон /ABS-пластик
Размер	31x82 мм.
Вес	54 гр.
Аккумулятор	200 мАч
Время работы	4 часа
Частота вибраций	7200 оборот. / мин.
Водонепроницаемость	IP67*

*Защита от временного погружения в воду.

Комплектация

Тренажер Кегеля Gballs ²	1
Руководство пользователя	1
Чехол для хранения	1
Зарядное устройство (USB-кабель)	1

Подготовка

- **Скачайте приложение**

Найдите приложение **Magic Kegel** для iOS в App Store или для Android в Google Play



- **Соедините тренажер Gballs² со смартфоном**

Запустите приложение **Magic Kegel** и следуйте инструкции для подключения к устройству Gballs².

- **Включите ваше устройство Gballs²**

О включении вас оповестит загоревшийся индикатор.



Приложение покажет подключенное устройство, когда Gballs² успешно соединится со смартфоном.



Получайте удовольствие от тренировок

Подберите комфортную для вас позицию для введения устройства. Многие женщины считают наиболее комфортными позиции “лежа на спине” или “стоя”.

Для легкого введения устройства рекомендуем вам использовать небольшое количество лубриканта на водной основе. Наносите лубрикант непосредственно на устройство Gballs² или на презерватив.



Подсказка: Не вводите устройство Gballs² полностью. Оставляйте шнур снаружи для того, чтобы сохранить хороший сигнал для связи со смартфоном, и для легкого извлечения устройства после окончания тренировки.

Выключение

Для того, чтобы выключить устройство, нажмите на клавишу питания и удерживайте 3 секунды.

Световой индикатор загорится, оповещая вас об отключении.




Последующее использование

- Запустите приложение **Magic Kegel** и включите Gballs²



- Встряхните смартфон, чтобы соединить Gballs² с приложением **Magic Kegel**

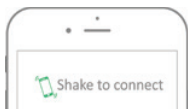

- Приложение отобразит подключение Gballs² к вашему смартфону



- Выберите подходящий курс

Независимые режимы

(без использования смартфона)

- **Режим вибрации при сжатии (режим по умолчанию)**

Включите устройство Gballs² и сжимайте мышцы таза, чтобы контролировать силу вибрации устройства Gballs².



- **Режим постоянной вибрации**


Нажмите кнопку включения, чтобы перейти от режима “Сжатие” к режиму постоянной вибрации.



Подсказка: Нажмите кнопку питания еще раз, чтобы снова перейти от режима постоянной вибрации в режим “Сжатие”.

Режим тренировки

- Включите Gballs² и подключите к приложению **Magic Kegel**
- На странице настроек приложения **Magic Kegel** выберите опцию “Режим Off-line”.

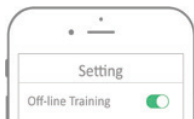

Подсказка: Текущий курс обучения будет загружен на ваше устройство Gballs².


- Включите устройство Gballs² и учебный курс начнется через 30 секунд.

Подсказка: Чтобы выйти из “Режима Off-line”, снова подключите Gballs² к приложению Magic Kegel


- Сжимайте мышцы таза, когда вибрация начнется.

Зарядка аккумулятора

- Подключите USB-кабель в гнездо для зарядного устройства.

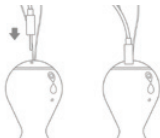

- Подключите USB-порт к ноутбуку, персональному компьютеру или зарядному адаптеру для смартфонов. Включите адаптер в розетку.

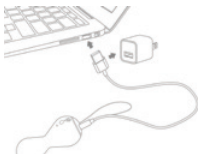

- Световой индикатор будет обозначать, что зарядка началась. Индикатор погаснет, когда устройство будет полностью заряжено.

Совет: Полностью разрядите устройство, прежде чем заряжать его в первый раз. Время первой зарядки устройства должно составлять 4 часа.

Очистка Gballs²

Перед использованием

Промойте устройство теплой водой с антибактериальным мылом перед первым использованием.

После использования

Промойте устройство теплой водой с антибактериальным мылом и протрите полотенцем.

Хранение

Храните устройство Gballs² в прохладном проветриваемом месте. Не допускайте попадания прямых солнечных лучей. Храните в недоступном для детей месте.



Ответы на самые распространенные вопросы

Q: У вас есть версия Magic Kegel для Android?

А: Да, устройство Gballs² можно синхронизировать с приложениями на смартфонах на iOS и Android. Операционная система Android должна иметь версию 4.3 и выше, кроме того, ваш телефон на Android должен поддерживать версию Bluetooth 4.0.

Q: Будет ли синхронизироваться устройство Gballs2 с приложением на смартфоне, если мой Android не имеет версии Bluetooth 4.0?

А: Устройство Gballs² имеет независимый режим работы. Для использования независимого режима смартфон не нужен. Вы можете ознакомиться с работой независимого режима в руководстве пользователя.

Q: Я не могу установить приложение Magic Kegel на Android. Выдается ошибка: "Parse Error: there is a problem parsing the package".

А: Такая ошибка обозначает, что ваша версия Android ниже необходимой версии Android 4.3.

Q:Bluetooth был подключен в настройках моего Android-смартфона. Почему приложение показывает “not connected”?

А: Для того, чтобы использовать устройство Gballs² с Bluetooth 4.0. вам не нужно настраивать соединение с Bluetooth, необходимо включить приложение, и встряхнуть смартфон для того, чтобы произошло соединение. Если вы установили связь с Bluetooth в конфигурации системы, необходимо отключить Bluetooth и запустить приложение Magic Kegel.

Q: Почему во время тренировки произошло отключение сигнала?

А: Шнур устройства Gballs² также работает в качестве антенны. Пожалуйста, оставляйте шнур устройства за пределами тела, по крайней мере, на 3 см., чтобы сохранить хороший сигнал.

