

LELO

Лавка  Фрейда

LUNA Smart Bead™

РУКОВОДСТВО И ИНФОРМАЦИЯ О ГАРАНТИИ

LavkaFreida.ru



РЕГИСТРАЦИЯ ГАРАНТИЙНОГО ТАЛОНА

Для того, чтобы зарегистрировать Ваш гарантийный талон, Вам необходимо: зайти на сайт LELO.com, нажать на окошко Регистрация в верхнем правом углу страницы и ввести гарантийный номер продукта, указанный на сертификате LELO, который попадает к Вам в руки при покупке любого нашего продукта. Это позволит нам убедиться в подлинности приобретенного Вами аксессуара и защитить Вашу покупку.

СОДЕРЖАНИЕ

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ	05
ИНФОРМАЦИЯ О ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА	06
СХЕМАТИЧНОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ LUNA SMART BEAD™	07
ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ	08
УХОД, ХРАНЕНИЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ	13
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	14
ДИСКЛАМАЦИЯ	15

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

LUNA Smart Bead™ - Ваш Персональный Кегель Тренер – интеллектуальный продукт удовольствия, который укрепит мышцы тазового дна и со временем усилит оргазмы. LUNA Smart Bead™ также может быть использован, как вибромассажер, расслабляющий тело и повышающий настроение.

В течение недель и месяцев как Вы используете LUNA Smart Bead™, она автоматически отслеживает Ваш прогресс и регулирует частоту вибраций, так как мышцы становятся сильнее, тем самым увеличивая плотность и активируя тазовое дно. Работать в направлении сильнейших оргазмов никогда не было так приятно и комфортно.

Обязательно проконсультируйтесь с врачом перед использованием LUNA Smart Bead™ во время беременности.

ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА

ГODOVое ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ


С момента покупки, LELO предоставляет Вам годовую гарантию на этот товар. Если Вы обнаружили дефект и сообщили об этом в течение срока гарантии, LELO, со своей стороны, обязуется обменять неисправный товар без какой-либо дополнительной платы. Гарантия распространяется на элементы, исправность, которых влияет на работу всего устройства. Гарантия не распространяется на косметические повреждения, связанные с неправильным хранением и уходом.

Любые попытки открыть устройство или разобрать его на части, приведут к потере гарантийного обслуживания. Чтобы подтвердить право на гарантийное обслуживание, пожалуйста, храните квитанцию о покупке. Чтобы воспользоваться правом на возврат товара по гарантии, пожалуйста, заполните необходимые данные на сайте LELO.com в разделе Обслуживание Клиентов, Вам будет выслан Регистрационный Номер Возврата, а также адрес ближайшего офиса LELO, куда Вам следует отправить неисправный товар с полученным ранее Регистрационным Номером Возврата. Стоимость доставки не возвращается.

10 ЛЕТ ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА

В продолжение правил годовой гарантии, LELO предлагает своим клиентам возможность приобретения любого из наших интимных массажеров со скидкой 50%. Подробности на сайте LELO.com, раздел Обслуживание Клиентов, вкладка Возврат и Замена.

СХЕМАТИЧНОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ LUNA SMART BEAD™

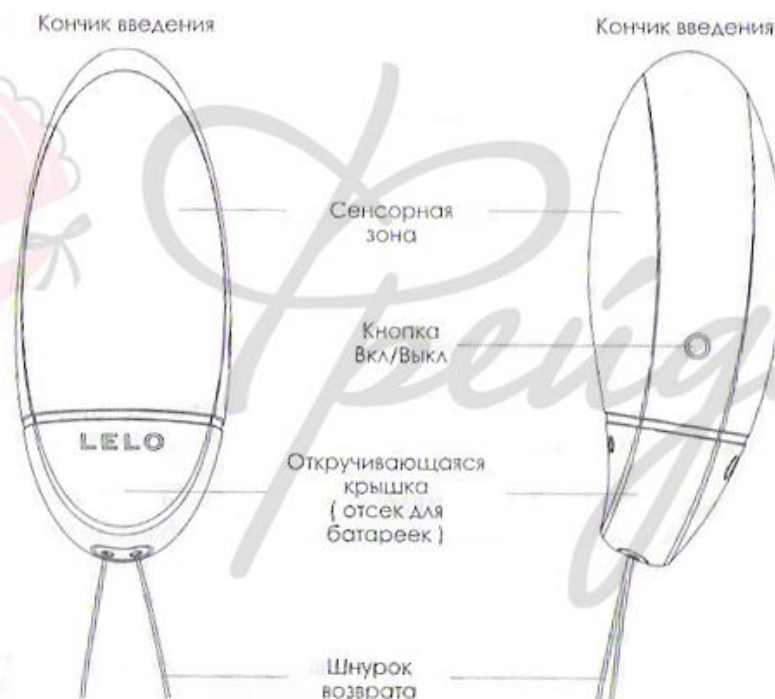

ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ВКЛЮЧЕНИЕ/ВЫКЛЮЧЕНИЕ

- Чтобы включить LUNA Smart Bead™, нажмите на кнопку «О».
- Устройство автоматически выключится по завершению упражнений, но если Вам необходимо выключить его до завершения тренировки, нажмите и удерживайте кнопку «О» в течение 2 секунд.
- В дополнение, до или после упражнений Вы можете активировать непрерывные мощные вибрации, нажав и удерживая кнопку «О» в течение 3 секунд.

ЗАМЕНА БАТАРЕЙКИ

- Одной полной AAA-батарейки должно хватить на 200 регулярных упражнений с Вашим Персональным Кегель Тренером.
- Если устройство не включается, или заметно падение интенсивности вибрации, пора менять батарейку.
- Не беспокойтесь о потере истории обучения, LUNA Smart Bead™ будет помнить Ваш прогресс даже после смены батарейки.

ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

1. Открутите нижнюю крышку LUNA Smart Bead™ и вставьте батарейку AAA.
2. Прикрутите крышку обратно и убедитесь, что она плотно прилегает. Если крышка закреплена должным образом, LUNA Smart Bead™ является 100% водонепроницаемой.
3. Всегда тщательно мойте массажер перед и после каждого использования.

4. Пожалуйста, НЕ помещайте LELO непосредственно в емкость с кипящей водой. Вы можете ополоснуть силикон кипятком, но мы настоятельно рекомендуем использовать очищающий спрей LELO's Antibacterial Cleaning Spray или другую продукцию, специально предназначенную для этой цели.

ПРИСТУПАЯ


- Нажмите кнопку «О», чтобы включить устройство. Индикатор LUNA Smart Bead будет мигать, указывая, на каком уровне Вы находитесь. Для первой тренировки заведомо установлен 3ий уровень. Процедура начнется автоматически через 30 секунд, предоставляя Вам время для введения.
- Найдите удобное положение для введения. Многие женщины находят наиболее комфортным лежа на спине или стоя. Для легкости введения, нанесите немного смазки на водной основе на кончик LUNA Smart Bead™.
- Вставьте устройство так же, как тампон, располагая кнопкой «О» с левой стороны, оставляя шнурок для вытягивания вне тела для безопасности и легкого изъятия.
- Когда устройство комфортно введено, дождитесь серии из 3х быстрых коротких вибраций, сигнализирующих о начале вашей тренировки.
- Теперь, просто сжимайте и удерживайте сокращение, пока Вы чувствуете вибрации, и расслабляйтесь, когда вибрации останавливаются. После первого использования, упражнения автоматически настроятся на уровень Вашей подготовки.
- Об окончании тренировки оповестит серия из 3х быстрых коротких вибраций, и LUNA Smart Bead™ автоматически выключится.
- Если устройство выключено и / или Вы уже закончили свою тренировку, Вы можете нажать кнопку «О» в течение 3 секунд, чтобы насладиться непрерывной мощной вибрацией.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ LUNA SMART BEAD™

- Так же, как личный тренер, LUNA Smart Bead™ установит режим, которому легко следовать, безопасный в использовании и полностью с учетом ваших индивидуальных потребностей.
- Все, что Вам нужно делать, это СЖИМАТЬ, когда он вибрирует и РАЗЖИМАТЬ, когда он останавливается.
- Ощущая вибрации - сжать мышцы таза и удерживать сокращение в течение всего действия вибрации. Интенсивность вибраций будет увеличиваться по мере сжатия (что Вы возможно ощутите или не ощутите), предназначено это для того, чтобы убедиться, что Вы правильно выполняете упражнения.
- Как только вибрации прекратятся, разожмите, расслабьте мышцы и ждите следующей вибрации, чтобы продолжить.
- Повторяйте эти действия на протяжении всей тренировки.
- 3 быстрых остановки оповестят о завершении тренировки, и устройство автоматически выключится.
- Не используйте анально.
- НЕ крутите устройство, когда оно введено внутрь, извлекайте только потянув за шнурок.

ПОСЛЕ ТРЕНИРОВКИ

- Удалите LUNA Smart Bead™, полностью расслабив мышцы, тщательно захватив шнурок возврата и аккуратно потянув наружу.
- Перед тем, как убрать устройство на хранение, убедитесь, что LUNA Smart Bead™ тщательно очищена и абсолютно сухая.

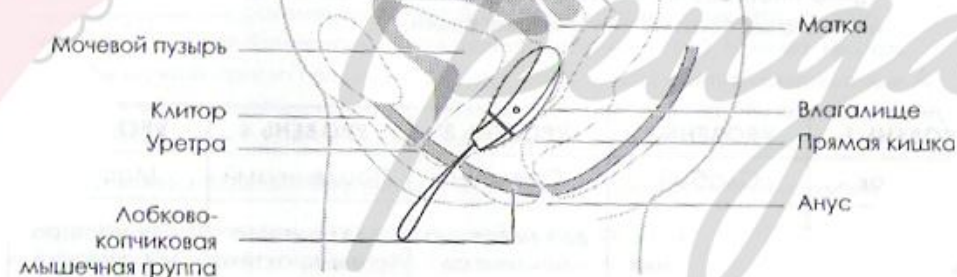

ПЕРЕХОД НА НОВЫЙ УРОВЕНЬ

LUNA Smart Bead™ располагает функцией памяти упражнений Кегеля, которая запомнит Вашу предыдущую тренировку и выберет подходящую программу, на основе тонуса мышц таза.

По мере прохождения через 5 встроенных программ упражнений, направленных на повышение сознательного сокращения и расслабления мышц тазового дна, усилятся и Ваши оргазмы за счет улучшения Кегель контроля. Отследить прогресс поможет индикатор, расположенный сразу за кнопкой «О», светодиод будет мигать при включении LUNA Smart Bead™, указывая на Ваш текущий уровень: одна вспышка - уровень 1, пять вспышек - уровень 5.

Первоначальное использование LUNA Smart Bead™ заведомо начнется с уровня 3.

Просто следуйте инструкциям Вашего Персонального Кегель тренера, и Вы будете испытывать интенсивные оргазмы в кратчайшие сроки.

УРОВЕНЬ 1	УРОВЕНЬ 2	УРОВЕНЬ 3	УРОВЕНЬ 4	УРОВЕНЬ 5
Новичок	Слабый	Средний	Продвинутый	Мастер
Для непосвященных, кто ранее не практиковал упражнения Кегеля	Для относительных новичков со слабой тазовой мускулатурой и малым контролем	Для умеренно опытных со средним тонусом таза и некоторым контролем	Для опытного Кегель практика с сильными мышцами таза и выраженным контролем	Для мастера упражнений Кегеля с превосходным тонусом таза и максимальным контролем

УХОД, БЕЗОПАСНОСТЬ И ХРАНЕНИЕ

Соблюдая рекомендованные нами простые правила по хранению и уходу за Вашим аксессуаром, Вы сможете значительно продлить срок его использования.

LELO рекомендует Вам пользоваться смазками, разработанными на водной основе, как, например, от LELO. Избегайте в использовании смазок на силиконовой основе, поскольку они могут сделать поверхность Вашего аксессуара липкой. Если Вы все-таки предпочитаете увлажняющее средство на силиконовой основе, проведите перед использованием небольшой тест на совместимость лубриканта с нашим аксессуаром.

Никогда не прибегайте к использованию массажного масла, крема для рук и других подобных увлажнителей с интимным аксессуаром от LELO. Не забывайте очищать Ваш аксессуар перед и после каждого его использования. Для того, чтобы наиболее эффективно очистить Ваш аксессуар, мы рекомендуем Вам пользоваться такими специально разработанными средствами, как антибактериальный очищающий спрей от LELO. Если его не оказалось под рукой, Вы можете просто помыть аксессуар теплой водой с антибактериальным мылом и сполоснуть его под горячей водой. Не забудьте насухо вытереть его безворсовой салфеткой или полотенцем. Никогда не используйте средства, содержащие алкоголь, бензин или ацетон.

Ваш LELO является 100% водонепроницаемым и пригоден для погружения на глубину до 1 метра.

Избегайте попадания прямых солнечных лучей на Ваш аксессуар и НИКОГДА не подвергайте его нагреву. Храните Ваш аксессуар в защищенном от пыли месте и избегайте контакта с интимными массажерами, сделанными из других материалов.

ВНИМАНИЕ: Этот продукт предназначен только для взрослых. Если Вы беременны, у Вас установлен кардиостимулятор, Вы страдаете флебитом, флебтом или тромбозом, Вам следует проконсультироваться с врачом относительно рисков свертывания крови перед использованием любого интимного массажера.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

МАТЕРИАЛЫ:	безопасный для здоровья силикон и АБС пластик
ОТДЕЛКА:	матовая
РАЗМЕР:	34 x 31 x 82 мм
ВЕС:	50гр
БАТАРЕЙКА:	стандартная, типа AAA
РЕЖИМ ОЖИДАНИЯ:	до 30 дней
ЧАСТОТА:	125 гц
МАКС. УРОВЕНЬ ШУМА:	< 50 дБ
ИНТЕРФЕЙС:	однокнопочный, с био-подбором Индивидуальной Кегель Тренировки

Утилизация старого электронного оборудования (применяемая в ЕС и других странах с системой раздельного сбора отходов)

Знак перечеркнутой корзины означает, что этот продукт не может быть утилизирован как стандартный бытовой отход, а должен быть сдан в специальный пункт утилизации электронного и электрического оборудования.



ДИСКЛАМАЦИЯ

Потребители, использующие этот продукт, делают это под собственную ответственность. LELO или партнеры компании не несут никакой ответственности или обязательств относительно использования этого продукта. Кроме того, LELO оставляет за собой право пересмотреть данное руководство и внести изменения в его содержание, без обязательства уведомлять какое-либо лицо или организацию о таком пересмотре или изменении.

Модель может быть изменена с целью улучшения без предварительного уведомления.

© 2014/2015 ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ И ПРИНАДЛЕЖАТ LELO AB.

РАЗРАБОТАНО LELO ШВЕЦИЯ

ПРОИЗВЕДЕНО LELO, КИТАЙ

ВЕБ-САЙТ LavkaFreida.ru